

Exocad


nuova versione 5541

PREMESSA


Gli utenti che hanno familiarità con il software Exocad saranno in grado di effettuare facilmente il passaggio alla nuova versione del software: nonostante i significativi cambiamenti grafici, il flusso di lavoro familiare è stato mantenuto.

Ecco alcune delle nuove funzioni disponibili nella nuova versione:

- Migliorata l'interfaccia grafica per aiutare i nuovi utenti durante la progettazione grazie ad un "Wizard" ancora più intuitivo che vi guiderà passo-passo verso la realizzazione della vostra protesi. Mentre per gli utenti più esperti è stata introdotta la nuovissima "Expert Mode" che vi permetterà di uscire dal sentiero guidato del Wizard per cimentarvi in una progettazione libera.
- Supporto multitouch con pieno supporto per monitor ad alta risoluzione, tra cui i più recenti monitor 4K (ancora più performanti dei monitor HD e Full HD).
- Aiuto notifiche che danno consigli per l'utente. Se il software rileva l'utilizzo inefficiente (ad esempio, non utilizzando tasti di scelta rapida che permettono di risparmiare tempo), l'utente verrà avvisato con una notifica di aiuto.
- L'attivazione della visualizzazione "Distanza da antagonista", è ora disponibile con un solo click sulla toolbar.

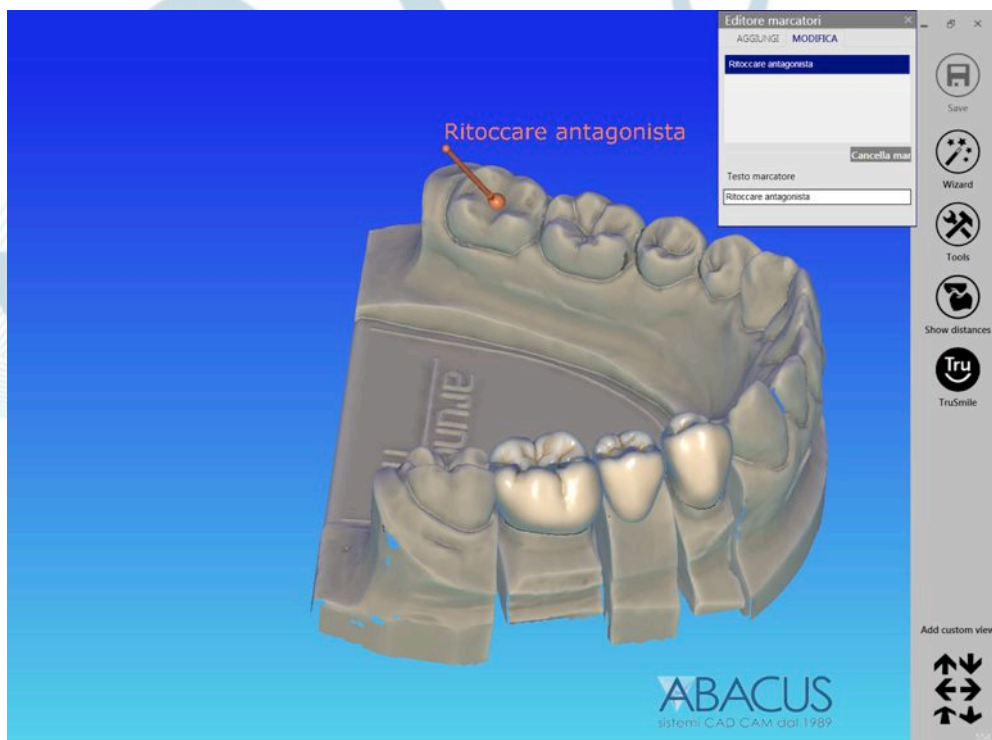

- E' ora possibile aggiungere gli attacchi durante la modellazione Freeform anche senza averlo previsto nel DB.
- Supporto webcam e una migliore integrazione di immagini 2D.
- TruSmile: consente di selezionare il colore specifico della ricostruzione (Zirconia, Cr-Co, Oro) ed utilizzare anche i 16 colori della scala VITA.

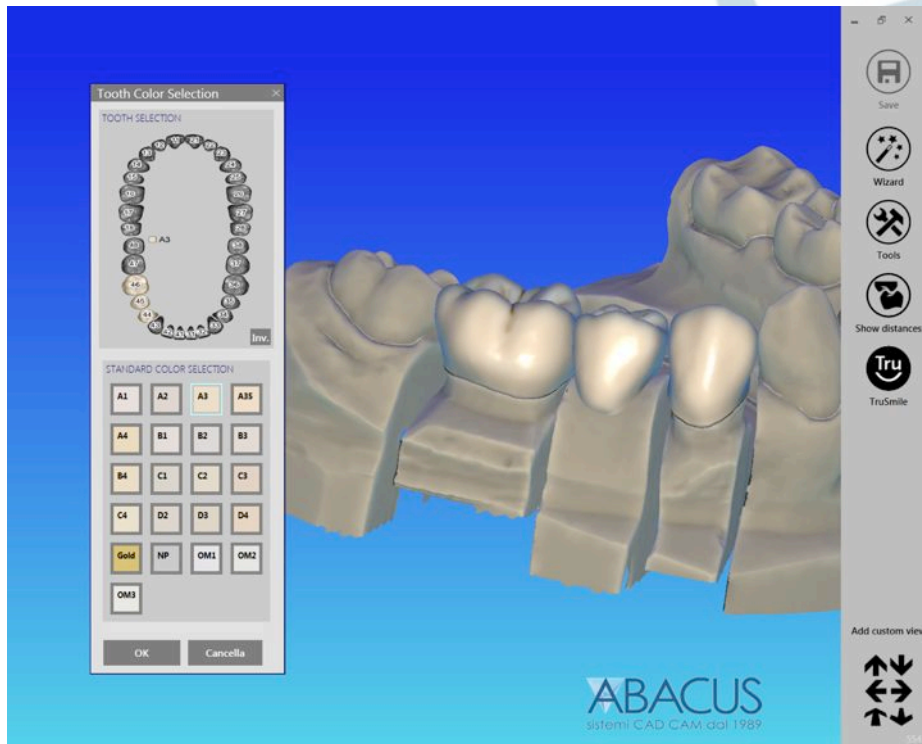

- Inserita la funzione "Annotazioni" per aggiungere commenti al vostro progetto.
- Visualizzazioni personalizzate: ora è possibile definire la vista personalizzata utilizzando il tasto "Aggiungi visualizzazione personalizzata" in basso a destra. Le viste personalizzate sono salvate insieme alla scena specifica del progetto. È anche possibile assegnare loro un nome (tasto destro del mouse per modificare il nome).
Esempio: Utile a simulare diversi assi di inserzione per la fresatura.
Le viste personalizzate sono utilizzate anche durante la generazione di file PDF 3D.

Sistemi Operativi supportati:

Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
(sia a 32 che a 64bit)



ABACUS
sistemi CAD CAM dal 1989

Abacus Sistemi Cad – Cam S.r.l.

telefono 0523 590640 – fax 0523 591474
web ed email: www.abacusdentale.it - dentale@abacus.it
Sede Legale e Amministrativa Via C. Colombo 101 – 29122 Piacenza
Cod. Fisc. e Partita IVA 01359080338 – R.E.A. Piacenza n. 155575
Capitale Sociale: 30.000 euro interamente versato